

Удаление накипи POWER steamer 1+2



Обратите внимание!

- ☑ Регулярно промывайте прибор водой или еженедельно при использовании смягчителя на основе соли. Также следуйте инструкциям в руководстве по эксплуатации.
- ☑ Использовать исключительно средство Renfert „POWER steamer descaler“ (содержит защиту от коррозии).
- ☑ Другие средства для удаления накипи, такие как лимонная кислота, могут повредить прибор
- ☑ Внимание: растворитель накипи едкий!
- ☑ Пользоваться защитными очками и защитными перчатками!
- ☑ Во время удаления накипи устройство эксплуатировать нельзя!
- ☑ Заправочное отверстие должно оставаться открытым во время всего процесса!



Шаг за шагом

1. Отключите устройство от сети и дайте ему остыть.
2. Открыть контрольное окно.
3. Очистите напорный резервуар с помощью воды и щетки.
4. Закрыть контрольное окно.
5. Сначала залейте 1 л воды в напорный резервуар, затем добавьте 1 л Renfert „POWER steamer descaler“.
6. Через 15 минут добавьте 0,6-0,8 л воды. При появлении пены продолжить заполнение только после того, как пена осядет.
7. Оставьте действовать на 2-4 часа для легких загрязнений и на 8-14 часов для более сильных загрязнений.
8. Осторожно откройте контрольное отверстие и слейте раствор для удаления накипи.
9. Утилизируйте использованный раствор средства для удаления накипи в сильно разбавленном виде в сточные воды.
10. Промойте резервуар несколько раз водой и почистите щеткой.

Дополнительная информация

Дополнительную информацию, такую как инструкции, паспорта безопасности, видеоролики по применению и т.д., можно найти на нашем сайте.



[www.renfert.com/
power-steamer-1](http://www.renfert.com/power-steamer-1)



[www.renfert.com/
power-steamer-2](http://www.renfert.com/power-steamer-2)

