

Renfert

making work easy

NOVEDAD fórmula y color mejorados



Occlutec Spray

NOVEDAD Spray de oclusión



NOVEDAD Occlutec Spray

Spray de oclusión

Con colores brillantes mejorados, Occlutec Spray ofrece un marcado especialmente claro y detallado de puntos de contacto en los ámbitos del colado de esqueléticos, coronas y puentes.

Ventajas

- Colores particularmente brillantes para un marcado óptimo.
- Dosificación óptima mediante micropulverizador.
- Rociado homogéneo independientemente del nivel de llenado del envase.

Detalles

- Color óptimo.
- Rendimiento significativamente mayor.
- Se puede retirar completamente con agua sin dejar residuos.

Making work easy


Occlutec Spray, con fórmula color mejorada, está optimizado para la protésica dental analógica y digital. Aquí, la demanda de precisión y limpieza en el laboratorio dental se une a una sólida calidad y rentabilidad. De este modo, el resultado es típico de Renfert: "making work easy".



NOVEDAD fórmula y color mejorados


Cómo conseguir la mejor calidad

Aplicación: Para poder aprovechar todas las ventajas y la alta calidad del producto, hay que tener en cuenta dos puntos:

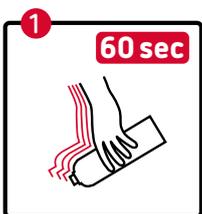

Agitar

Antes de cada uso, agitar enérgicamente la lata durante 60 segundos, la cabeza del pulverizador hacia abajo. La esfera integrada debe ser claramente audible.


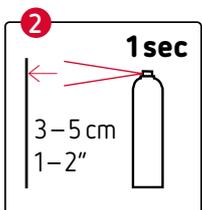


Aplicación

La distancia de pulverización hasta el objeto debe ser de 3-5 cm. Pulverizar en ráfagas de 1 segundo agitando ligeramente.

NOVEDAD: ¡Colores brillantes!

Nueva fórmula, nuevo color. Los colores particularmente brillantes proporcionan un marcado claro y facilitan la identificación de los puntos de contacto.

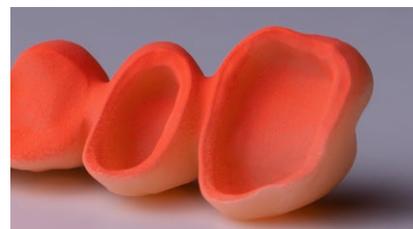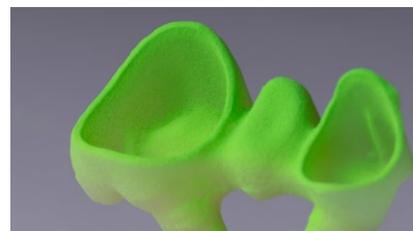

PREMIUM QUALITY
MADE IN GERMANY

Referencias

Occlutec Spray verde	75 ml	No. 19352000
Occlutec Spray rojo	75 ml	No. 19353000