

Renfert

making work easy

НОВЫЙ



Renfert-Scanspray classic

НОВИНКА

Матирующий спрей,
баллончик размера XL

НОВИНКА Renfert-Scanspray classic

Матирующий спрей, баллончик размера XL

Renfert-Scanspray classic* – это мелкозернистый 3D матирующий спрей для экстраорального сканирования глянцевых или сильно отражающих поверхностей (например, моделей, первичных коронок, каркасов). Он впечатляет своей высокой производительностью и экономичностью, а также сверхбольшим баллончиком XL, которого хватает надолго.

Преимущества

- Особая мелкозернистость и тонкое, однородное нанесение слоя для получения детальных результатов сканирования.
- Точное отображение краев и высокая непрозрачность для высокоточной оцифровки объектов.
- Формат XL (500 мл) для особенно экономичного применения.
- Без TiO₂ - не содержит диоксид титана.

Детали

- Никакого образования хлопьев и пузырьков (агломерации) и, следовательно, значительное снижение погрешности размеров.
- Большая производительность благодаря незначительному расходу и нанесению микротонкого слоя.
- Специальный клапан для порошка обеспечивает тончайшее распыление тумана для точного матирования.
- Оптимальная адгезия даже на полированных поверхностях (керамика, металл и т.д.) обеспечивает легкое нанесение.



Опасно. Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль. Баллон под давлением. При нагревании возможен взрыв. Может вызвать сонливость и головокружение. Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.



PREMIUM QUALITY
MADE IN GERMANY



Однородное нанесение слоя для получения детальных результатов сканирования


Как достичь наилучшего результата

Применение: Для полного использования эксплуатационных характеристик и высокого качества продукта, необходимо соблюдать два пункта:



Встряхнуть

Перед каждым использованием необходимо сильно встряхивать баллон в течение 60 секунд распылительной головкой вниз. Движение шара в баллоне должно быть хорошо слышно.

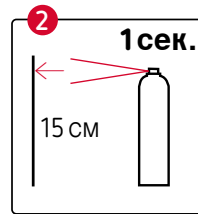

Наносить

Расстояние от распылительной головки до объекта должно составлять 15 см. Наносите спрей 1-секундным нажатием при легком движении.

Информация для заказа

Renfert-Scanspray classic, 500 мл

№ 17311000

* доступно только на отдельных рынках