

Renfert

making work easy

NEW

improved
formula & color



Occlutec Spray

NEU Okklusionsspray



NEU Occlutec Spray

Okklusionsspray

Occlutec Spray bietet eine besonders klare und detaillierte Markierung von Störstellen durch verbesserte leuchtende Farben in den Bereichen Modellguss, Kronen und Brücken.

Vorteile

- Besonders leuchtende Farben für optimale Trennschärfe.
- Optimale Dosierung durch mikropulverisierten Sprühfilm.
- Homogenes Aussprühverhalten, unabhängig vom Füllstand der Dose.

Details

- Optimale Farbe.
- Deutlich höhere Ergiebigkeit.
- Zu 100 % mit Wasser abwaschbar, rückstandslos entfernbar.


Making work easy

Occlutec Spray mit verbesserter Farb Rezeptur ist optimiert für die analoge und digitale Zahntechnik. Hier trifft der Anspruch an Präzision und Sauberkeit im Dentallabor auf solide Qualität und Wirtschaftlichkeit. Und so ist das Ergebnis eben typisch Renfert: „making work easy“.




Der Weg zur besten Qualität!

Anwendung: Um die volle Leistung und die hohe Qualität des Produktes nutzen zu können, sind zwei Punkte zu beachten:

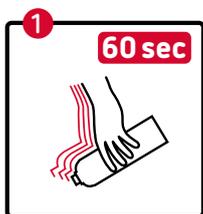

Schütteln

Vor jedem Gebrauch die Dose 60 Sekunden kräftig über Kopf schütteln. Die integrierte Kugel muss deutlich hörbar sein.


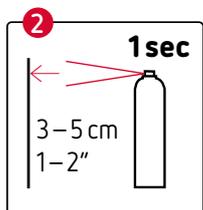


Auftrag

Der Sprühabstand zum Objekt soll 3–5 cm betragen. In 1-sekundigen Sprühstößen mit leichter Bewegung aufspritzen.

NEU: Strahlende Farben!

Neue Formel, neue Farbe. Die besonders leuchtenden Farben schaffen eine optimale Trennschärfe und erleichtern das Identifizieren der Störstellen.

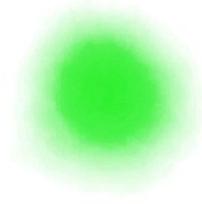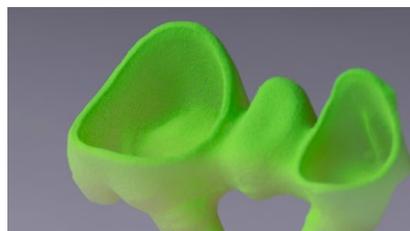

PREMIUM QUALITY
MADE IN GERMANY

Bestellinformationen

Occlutec Spray grün	75 ml	No. 19352000
Occlutec Spray rot	75 ml	No. 19353000