

**Renfert**

making work easy

**NOVITÀ** formulazione & colori migliorati



# Occlutec Spray

**NOVITÀ** Spray di occlusione



# NOVITÀ Occlutec Spray

## Spray di occlusione

Grazie ai colori brillanti ottimizzati, Occlutec Spray offre una rilevazione particolarmente chiara e dettagliata dei punti di disturbo nell'ambito degli scheletrati e di corone e ponti.

### Vantaggi

- Colori particolarmente brillanti per un rilevamento ottimale.
- Dosaggio ottimale del prodotto micropolverizzato.
- Erogazione omogenea indipendentemente dal livello di riempimento della bomboletta.

### Dettagli

- Colore ottimale.
- Resa significativamente più elevata.
- Si elimina completamente con l'acqua, senza lasciar residui.

### Making work easy


Occlutec Spray con formulazione migliorata del colore è ottimizzato per la tecnologia dentale analogica e digitale. Questo prodotto di qualità e conveniente soddisfa ogni esigenza riguardo la precisione e la pulizia nel laboratorio odontotecnico. Così il risultato è tipicamente Renfert: "making work easy".



**NOVITÀ** formulazione & colori migliorati


### Come ottenere la miglior qualità

Applicazione: Per poter sfruttare al meglio le prestazioni e l'alta qualità del prodotto, è necessario osservare due punti:

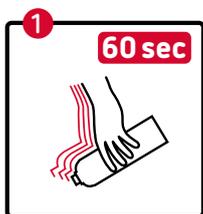

#### Agitare

Prima di ogni utilizzo, agitare vigorosamente la bomboletta a testa in giù per 60 secondi. La sfera integrata deve essere chiaramente udibile.

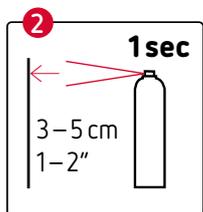


#### Applicazione

La distanza di spruzzatura dall'oggetto deve essere di 3-5 cm. Spruzzare in dosi di 1 secondo con un leggero movimento.

### NOVITÀ: Colori brillanti!

Nuova formulazione, nuovo colore. I colori particolarmente brillanti creano un rilevamento ottimale e facilitano l'identificazione dei punti di disturbo.

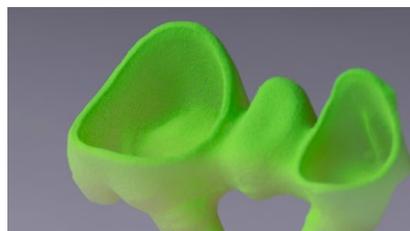

PREMIUM QUALITY  
MADE IN GERMANY

### Referenze

Occlutec Spray verde	75 ml	No. 19352000
Occlutec Spray rosso	75 ml	No. 19353000