

**Renfert**

making work easy

**NOVO**



# Renfert-Scanspray classic

**NOVO** Spray de fosqueamento em lata XL

# NOVO Renfert-Scanspray classic

## Spray de fosqueamento em lata XL

O Renfert-Scanspray classic\* é um spray de fosqueamento 3D de fina granulação para o escaneamento extraoral de superfícies brilhantes ou altamente refletoras (por exemplo, modelos, coroas primárias, estruturas), impressionando com seu alto rendimento e economia, bem como a lata XL extragrande para uma utilização intensa.

### Vantagens

- Granulação extremamente fina e aplicação de camada tênue e homogênea para resultados de escaneamento detalhados.
- Exposição exata das arestas e alta opacidade para a digitalização altamente precisa de objetos.
- Formato XL (500 ml) para uma utilização particularmente econômica
- Sem  $\text{TiO}_2$  - sem dióxido de titânio.

### Detalhes

- Sem formação de flocos ou bolhas (aglomeração) resultando em uma redução significativa dos erros dimensionais.
- Alto rendimento graças à aplicação de camadas tênues e microfinas.
- A válvula especial proporciona uma névoa de pulverização mais fina para um fosqueamento preciso.
- A ótima aderência, mesmo em superfícies polidas (cerâmica, metal, etc.), garante uma fácil aplicação.
- O tempo de secagem rápido e a facilidade de remoção permitem um fluxo de trabalho eficiente.



**Perigo.** Aerossol extremamente inflamável. Recipiente pressurizado: pode romper se aquecido. Pode provocar sonolência ou vertigem. Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.




**PREMIUM QUALITY**  
**MADE IN GERMANY**



Aplicação de camada homogênea para resultados de escaneamento detalhados


### Como obter a melhor qualidade

Aplicação: Para poder aproveitar todo o desempenho e a elevada qualidade do produto, devem ser observados dois pontos:

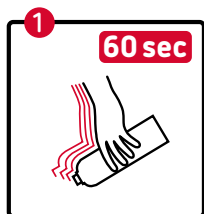

#### Agitar

Antes de cada utilização agitar vigorosamente a lata virada para baixo durante 60 segundos. A esfera integrada deve ser claramente audível.

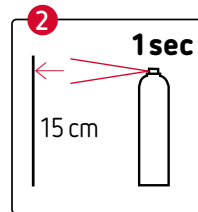

#### Aplicação

A distância de pulverização do objeto deve ser de 15 cm. Pulverizar em rajadas de 1 segundo com uma ligeira atuação.

### Informações para encomenda

Renfert-Scanspray classic, 500 ml

Nº 17311000

\* Somente disponível em mercados selecionados

Outros dados do produto em: [www.renfert.com/p/Número de referência](http://www.renfert.com/p/Número de referência)