

Renfert

making work easy

NOVEDAD



Renfert-Scanspray classic

NOVEDAD Spray de mateado en envase XL

NOVEDAD Renfert-Scanspray classic

Spray de mateado en envase XL

Renfert-Scanspray classic* es un spray de mateado 3D de grano ultrafino para el escaneo extraoral de superficies brillantes o muy reflectantes (como modelos, coronas primarias o estructuras). Este producto convence por su gran eficacia y rentabilidad, así como por el tamaño XL extragrande para mayor rendimiento.

Ventajas

- Tamaño granular ultrafino y aplicación de capas finas y homogéneas para unas capturas más detalladas.
- Óptima detección con representación exacta de los perfiles y excelente opacidad para digitalizar objetos con gran precisión.
- Envase XL (500 ml) para un uso más rentable.
- Sin TiO_2 - libre de dióxido de titanio.

Detalles

- Sin formación de grumos ni burbujas (aglomeración), por lo que se reducen considerablemente los errores dimensionales.
- Alto rendimiento gracias a la aplicación de capas muy ligeras y microfinas.
- La boquilla de rociado especial permite realizar un pulverizado extrafino y obtener así un mateado preciso.
- Su óptima adherencia, incluso en superficies pulidas (como cerámicas o metales), garantiza una fácil aplicación.
- El rápido tiempo de secado y su sencilla eliminación favorecen un proceso de trabajo eficiente.



Peligro. Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta. Puede provocar somnolencia o vértigo. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.




PREMIUM QUALITY
MADE IN GERMANY



Pulverización homogénea para unas capturas más detalladas


Cómo conseguir la mejor calidad

Aplicación: Para poder aprovechar todas las ventajas y la alta calidad del producto, hay que tener en cuenta dos puntos:

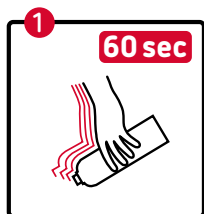

Agitar

Antes de cada uso, agitar enérgicamente la lata durante 60 segundos, la cabeza del pulverizador hacia abajo. La esfera integrada debe ser claramente audible.

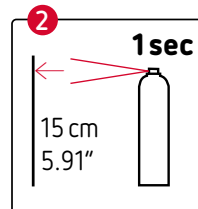

Aplicación

La distancia de pulverización hasta el objeto debe ser de 15 cm. Pulverizar en ráfagas de 1 segundo agitando ligeramente.

Referencias

Renfert-Scanspray classic, 500 ml (17 fl.oz.)

No. 17311000

* No disponible en todos los mercados