



making work easy

de



SILENT XS

FAQ - frequently asked questions

Made in Germany

205212 03032026

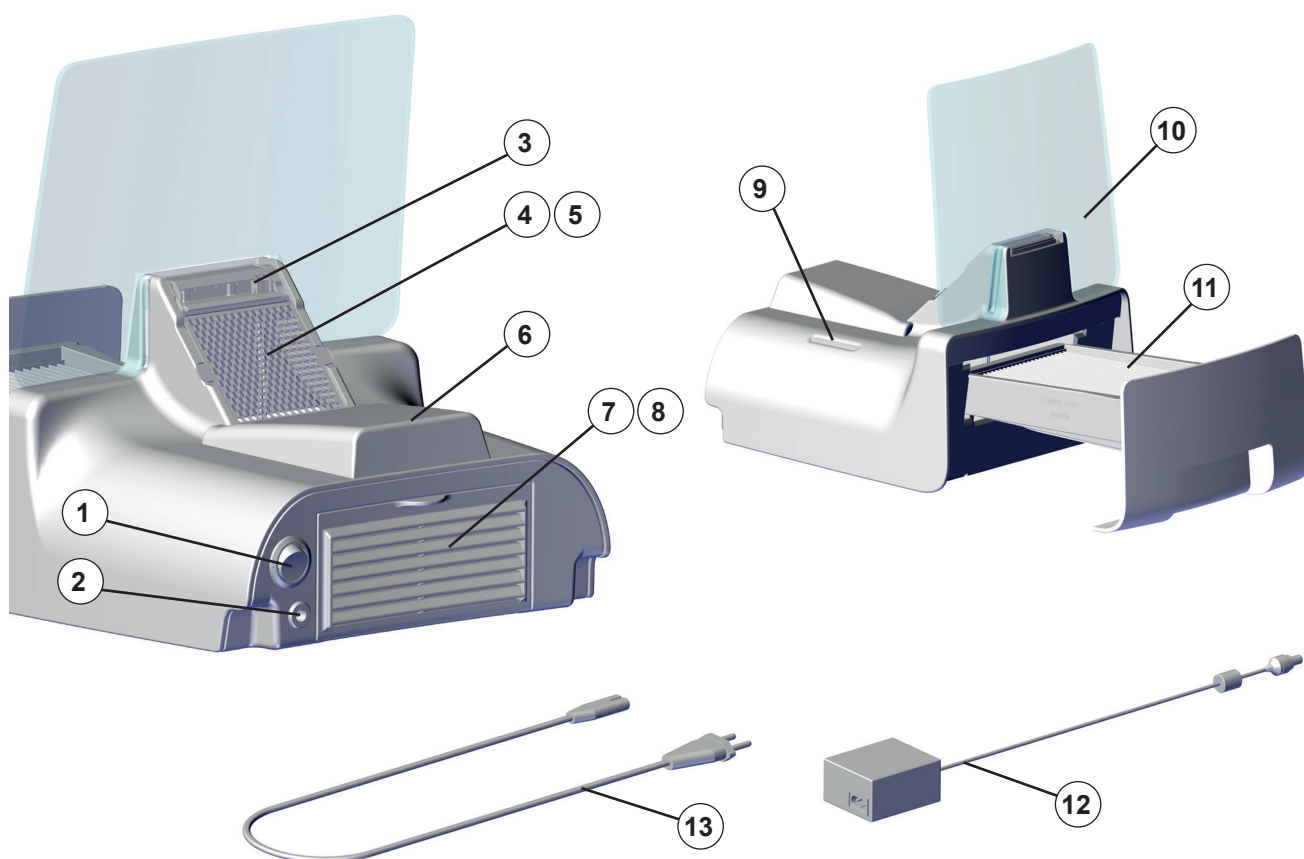


Fig. 1

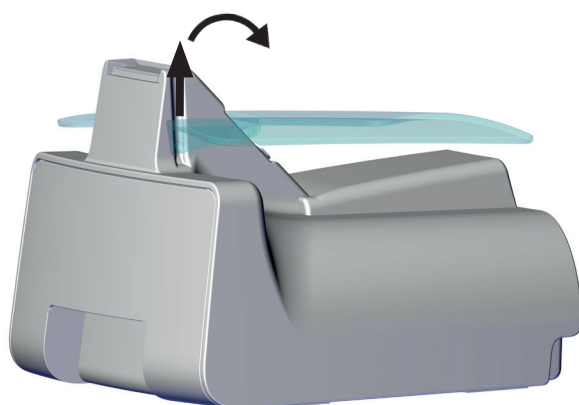


Fig. 2



www.renfert.com/td/prod/pp0010



Hier finden Sie u.a. folgende Dokumente und Informationen zum Download:

- Bedienungsanleitung
- Quick Start Guide
- Ersatzteillisten und Ersatzteilzeichnungen
- Reparaturanleitung
- FAQ's, Ursache und Behebung von Störungen
- How to – Videos
- Konformitätserklärungen

Bitte beachten Sie: Die aufgeführten Dokumente und Informationen sind nicht für alle Produkte erhältlich.

FAQ - Deutsch



Hinweise auf Kapitel beziehen sich auf die vollständige Bedienungsanleitung im Internet.

Frage / Fehler / Problem	Ursache / Erklärung	Antwort / Fehlerbehebung / Abhilfe
Wie kann das Gerät optimal für die nächste Verwendung/Benutzung vorbereitet werden? (Lagerung/Desinfizierung...)		• Verschmutzungen/ Schleifrückstände nach jeder Nuzung beseitigen. • Hinweise aus Hygiene-Leitfaden berücksichtigen (siehe Kap. 3.2 und Hygieneleitfaden).
Warum dauert es einige Sekunden bis die Akkustandanzeige (weiße LEDs bei eingelegten Akkus) erscheint?	• keine Fehlfunktion	• Die Ermittlung des Ladezustandes benötigt bis 4 Sekunden und kann nicht beschleunigt werden.
Kann man bei der SILENT XS, die Saugstärke anpassen?	• keine Fehlfunktion	• Die Saugleistung ist nicht einstellbar. • Die Saugleistung ist in Akku- und Netzbetrieb identisch.
Akkus sind eingelegt, dennoch ist der Akkubetrieb nicht möglich.	• Polarität einzelner oder mehrerer Zellen im Akkuhalter verdreht.	• Polarität aller Akkus im Akkuhalter anhand der Kennzeichnung +/- prüfen und ggf. korrigieren.
	• Unzureichende Anzahl an Akkus.	• Erforderliche Anzahl an Akkus (8 x AA NiMH) in Akkuhalter einlegen. • Empfohlene Akkus beachten (siehe Kap. 4.2). • Mindestanforderungen an Akkus beachten (siehe Kap. 7).
	• Fehlender Kontakt einzelner oder mehrere Akkus im Akkuhalter.	• Alle Akkus im Akkuhalter müssen Kontakt zueinander und zu den metallischen Kontaktplättchen/ - federn haben. Am einfachsten geschieht dies durch leichtes drehen jeder einzelnen Zelle im Akkuhalter.
Die Ladezeit erscheint zu lang.	• Abhängig von Hersteller, Kapazität und Alter der eingelegten Akkus kann die Ladezeit bis zu 5h betragen. • Die Ladezeit verlängert sich, wenn das Gerät während des Ladens unter Netzbetrieb genutzt.	• Prüfen ob das Netzteil ordnungsgemäß in die Ladebuche eingesteckt ist und der Ladezustand über pulsierende weiße LEDs signalisiert wird. • Neue Akkus verwenden. - Empfohlene Akkus beachten (siehe Kap. 4.2). - Mindestanforderungen an Akkus beachten (siehe Kap. 7).

Frage / Fehler / Problem	Ursache / Erklärung	Antwort / Fehlerbehebung / Abhilfe
Können Li-Ion Akkus in der Silent XS verwendet werden?		• Nein! Der Einsatz im Gerät kann zu Schäden der Geräteelektronik oder der Akkus führen (nicht angepasster Ladeprozess). • Empfohlene Akkus beachten (siehe Kap. 4.2). • Mindestanforderungen an Akkus beachten (siehe Kap. 7).
Gerät wurde im Akkubetrieb genutzt, lief leer und lässt sich nicht mehr laden bzw. wurde über längere Zeit nicht geladen.	• Um die Akkus im Gerät vor Tiefenentladung zu schützen, greift ab einer zu geringen Spannung der Tiefenentladungsschutz im Gerät. Eine Ladung der Akkus ist dann aus Sicherheitsgründen nur ausserhalb der Gerätes möglich.	• Akkus entnehmen und mit externem Ladegerät (sofern vorhanden) aufladen. • Alternativ neue Akkus nutzen falls die Ladung in einem ext. Ladergerät nicht positiv verlief oder nicht möglich ist. • Gerät kann mit Hilfe des Netzteils immer genutzt werden.
Licht flackert im Akkubetrieb.	• In Kombination mit bestimmten Akkutypen kann es bei nachlassender Akkukapazität zu diesem Fehlerbild kommen.	• Akkus mit Hilfe des Netzteils vollständig aufladen. • Empfohlene Akkus beachten (siehe Kap. 4.2). • Mindestanforderungen an Akkus beachten (siehe Kap. 7).
Können Akkus unterschiedlicher Hersteller und Kapazitäten verwendet werden.		• Prinzipiell „ja“, aber: Abweichung bei Gerätelaufzeit und Ladezeit sind zu erwarten. • Akkus eines Herstellers und gleicher Kapazität verwenden. • Empfohlene Akkus beachten (siehe Kap. 4.2). • Mindestanforderungen an Akkus beachten (siehe Kap. 7).
Ladezustandsanzeige zeigt noch Kapazität, dennoch geht das Gerät aus.	• Kann bei Einsatz von nicht empfohlenen Akkus auftreten	• Empfohlene Akkus beachten (siehe Kap. 4.2). • Mindestanforderungen an Akkus beachten (siehe Kap. 7).
Kann ein anderes Netzteil zum Betrieb oder zur Ladung der Akkus im Gerät verwendet werden.	• Nein! Geräteschäden können nicht ausgeschlossen werden.	• Nur Original-Netzteil einsetzen.
Kann man die Silent XS auch ohne die Sichtscheibe verwenden bzw. verändert sich die Saugleistung und Partikeleinsaugung dadurch?	• Die Saugleistung ist durch die Nutzung nicht beeinträchtigt. • Ohne Sichtscheibe wird die Erfassung ungenau und Partikel können nicht wie vorgesehen erfasst werden.	• Immer mit Sichtscheibe verwenden.
Wie wird eine volle Staubschublade erkannt?	• Keine Erkennung.	• Staubschublade nach jedem Schleifvorgang leeren (siehe Kap. 5.3).
In welchen Intervallen muss ich den Feinfilter wechseln ?		• Der Feinfilter in der Schaubschublade (11) ist zu wechseln, wenn trotz Leerung die Saugleistung stark nachlässt (siehe Kap. 6.4).
Welche Materialien können mit der SILENT XS abgesaugt werden?		• Die SILENT XS ist zum Absaugen von trockenen, nicht explosionsfähigen Stäuben bei kleineren Anpassarbeiten an desinfizierten Objekten geeignet (siehe Kap. 2.1 und Kap. 2.8).

Hochaktuell und ausführlich auf ...
Up to date and in detail at ...
Actualisé et détaillé sous ...
Aggiornato e dettagliato su ...
La máxima actualidad y detalle en ...
Актуально и подробно на ...

www.renfert.com

Renfert GmbH • Untere Gießwiesen 2 • 78247 Hilzingen/Germany
Tel.: +49 7731 82 08-0 • Fax: +49 7731 82 08-70
www.renfert.com • info@renfert.com

Renfert USA • 3718 Illinois Avenue • St. Charles IL 60174/USA
Tel.: +1 6307 62 18 03 • Fax: +1 6307 62 97 87
www.renfert.com • info@renfertusa.com
USA: Free call 800 336 7422