

Renfert

making work easy

NEW



Renfert-Scanspray classic

NEU Mattierungsspray in der XL-Dose

NEU Renfert-Scanspray classic

Mattierungsspray in der XL-Dose

Renfert-Scanspray classic* ist ein feinkörniges 3D-Mattierungsspray für das extraorale Scannen von glänzenden oder stark reflektierenden Oberflächen (z. B. Modelle, Primärkronen, Gerüste) und überzeugt durch hohe Ergiebigkeit und Wirtschaftlichkeit sowie die extragroße XL-Dose für Poweruser.

Vorteile

- Hohe Feinkörnigkeit und feiner, homogener Schichtauftrag für detailgenaue Scanergebnisse.
- Exakte Kantendarstellung und hohe Opazität für das hochpräzise Digitalisieren von Objekten.
- XL-Format (500 ml) für eine besonders wirtschaftliche Anwendung.
- TiO_2 -frei - ohne Titandioxid.

Details

- Keine Flocken- und Blasenbildung (Agglomeration) und somit eine deutliche Reduktion von Dimensionsfehlern.
- Dank geringem und mikrofeinem Schichtauftrag hohe Ergiebigkeit.
- Spezielles Pulverventil ermöglicht feinsten Sprühnebel für ein punktgenaues Mattieren.
- Optimale Haftung auch auf polierten Oberflächen (Keramik, Metall etc.) sorgt für eine einfache Anwendung.
- Schnelle Trocknungszeit und einfache Entfernbarkeit unterstützen den effizienten Arbeitsablauf.

Making work easy

Mit dem Renfert-Scanspray classic lassen sich alle denkbaren Materialien mattieren, sodass relevante Oberflächenmerkmale sowie Makro- und Mikrotexturen präzise vom 3D-Laborscanner (auch älterer Baujahre) zu erfassen sind.



Gefahr. Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.




PREMIUM QUALITY
MADE IN GERMANY



Homogener Schichtauftrag für detailgenaue Scanergebnisse


Der Weg zur besten Qualität!

Anwendung: Um die volle Leistung und die hohe Qualität des Produktes nutzen zu können, sind zwei Punkte zu beachten:

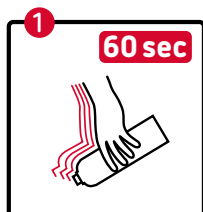

Schütteln

Vor jedem Gebrauch die Dose 60 Sekunden kräftig über Kopf schütteln. Die integrierte Kugel muss deutlich hörbar sein.

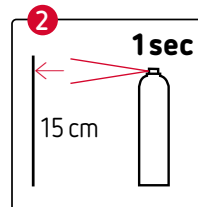

Auftrag

Der Sprühabstand zum Objekt soll 15 cm betragen. In 1-sekündigen Sprühstößen mit leichter Bewegung aufsprühen.

Bestellinformationen

Renfert-Scanspray classic, 500 ml

No. 17311000

* nur in ausgewählten Märkten verfügbar